



TEST SALIVARE THC KLEANER 1 TEST

[Read More](#)

SKU: IDG.17873

Price: €31,99 IVA inclusa

Categories: [Varie](#)

Product Description

Test Salivare THC Ultra-Sensibile Kleaner Questo dispositivo consente di rilevare l'uso di droghe tramite un campione di saliva in modo rapido, accurato e igienico, proprio come fa la polizia. È il test ideale per l'autocontrollo o per lo screening di terzi. Test che consente lo screening salivare del THC, il principio attivo della cannabis. Uno strumento qualitativo, del tipo "NO / SÌ", e fornirà quindi un risultato "NEGATIVO" o "POSITIVO" in modo rapido ed efficace.

- 2 linee rosse, il test è NEGATIVO.
- 1 sola linea rossa, il test è POSITIVO.

Il rilevamento della cannabis non è mai stato così efficace! Questo test della saliva mira al Delta 9-THC, la molecola della cannabis che si trova specificamente nella bocca. Il fumo delle sigarette di cannabis ne è saturo. Questo fumo contamina la cavità orale quando una persona fuma uno spinello, lasciandoci tracce per diverse ore. Questo test salivare rileva le stesse tracce di cannabis ricercate durante i controlli stradali da parte della polizia e della gendarmeria. Si tratta di una vera innovazione nel campo dei test di saliva, piuttosto che di un semplice test delle urine modificato. Come usarlo: 1- Posizionare la striscia in bocca e salivare per alcuni secondi. 2- Il test si avvia automaticamente. 3- Leggere i risultati dopo 10 minuti. Soglie di rilevamento: 10 ng/ml. Se il campione di saliva analizzato contiene un livello di THC superiore alla soglia indicata, il test sarà positivo, altrimenti, sarà negativo. Test dalla saliva per la cannabis (Delta9-THC 10) NarcoCheck Sostanze rilevate Delta9-THC con soglia di concentrazione 10 ng/mL Tempo di rilevamento della cannabis nella saliva: qualunque sia il test utilizzato, il THC (il principio attivo della cannabis) non può essere rilevato nella saliva per oltre 4-6 ore. La soglia di rilevamento estremamente bassa del test della saliva NarcoCheck consente di sfruttare al massimo questa finestra temporale. Il tempo di rilevamento del nostro test sarà quindi di 4-6 ore dopo l'ultimo spinello fumato, indipendentemente dal livello di consumo.